

Heben Sie sich ab mit Ihrer Exzellenten Kosmetikberatung

Multi Skin Test Center® MC 1000 & Software

Feuchtigkeit, Fett, Melanin, pH, Elastizität & mehr



Multifunktionsgerät zur computergesteuerten Hautanalyse

Alle C+K Sonden können dank der modularen C+K Sondentechnik parallel verwendet werden!

C+K Messsonden für die folgenden Hautparameter können angeschlossen werden: Feuchtigkeit, Fett, Pigmentation und Rötung, Transepidermaler Wasserverlust (TEWL - die Barrierefunktion der Haut), Hauttemperatur und -elastizität. Zusätzlich kann die Kamera Visioscope PC35 angeschlossen werden.



Das **Multi Skin Test Center® MC750** bietet abgesehen von der Kamera die gleichen Funktionen wie das MC 1000.

Bitte erfragen Sie unser spezielles Transportzubehör.

Technische Daten:

Externe Spannungsversorgung: 100-240 VAC/12VDC, Maße: 46 x 22 x 9 cm;

Gewicht ohne Sonden: ca. 1,8 kg, Schnittstellen: USB 2.0

Messprinzipien:

Feuchtigkeit: kapazitiv (Skala 0-99); Sebum: photometrisch (Skala 0-99); Elastizität: Ansaugmethode (Skala 0-99); Melanin/Erythem: Absorption/Reflexion (Skala 0-99); pH: Glasselektrode (pH mit einer Dezimalstelle); TEWL-Index: Offene Kammer mit Wasser-Flux Messung (Skala 0-20); zusätzlich Kamera Visioscope® PC35 Anschluss per USB an PC mit Windows® 7/ Windows® 8/ Windows® 10 Technische Änderungen vorbehalten.



www.courage-khazaka.de

Köln, Germany

Heben Sie sich ab mit Ihrer Exzellenten Kosmetikberatung

Multi Skin Test Center® MC 1000 & Software

Feuchtigkeit, Fett, Melanin, pH, Elastizität & mehr

CSI-Software

- Die benutzerfreundliche Software „Complete Skin Investigation“ macht die Arbeit mit dem System einfach.
- Individuelle Produktempfehlungen für Haut-, Haar- und Sonnenpflegeprodukte können für den Kunden ausgedruckt werden.
- Anstieg der Verkaufstätigkeiten durch das Angebot eines Spezialservices zur Unterscheidung von Konkurrenten und zur Kundenbindung.

Software mit 5 Programmen:

- Fragebögen in Kombination mit Feuchtigkeits-, Fett- und Elastizitätsmessungen zur **Hauttyp-Bestimmung** führen zur Empfehlung von Hautpflege-Produkten (Reinigung, Tag- und Nachtpflege, Zusatzpflege und Nahrungsergänzungen) für Frauen und Männer.
- Kamerabilder** mit dem Visioscope® PC 35 zur Bestimmung von Poren, Flecken und Falten. Komfortable Vergleichsmöglichkeit von nebeneinander gestellten Kundenbildern.

- Sebum Produktion & Hautabschuppung kann mit den Spezialfolien Sebuxif® und Corneofix® analysiert werden.


- Haar Analyse** (Messung von Sebum, Farbe, Darstellung von Schuppen, Haardicke) mit Fragen & Produktempfehlungen
- Durch Beantwortung des Fragenkatalogs in Verbindung mit Messung des Melaningehalts der Haut lassen sich die passenden **Sonnenschutz- und After-Sun-Produkte** empfehlen. Dabei wird berücksichtigt, wann und wie lange jemand der Sonne ausgesetzt sein wird unter Einbeziehung des jeweiligen UV-Indexes.

- Einzelmessungen** in beliebiger Reihenfolge und auf allen Körperstellen können gespeichert & ausgedruckt werden.

- Der Benutzer kann die Produktempfehlungen für jedes der Programme gemäß des Alters der Person, den Messergebnissen & Antworten zu den Fragen eingeben.

- Das Erscheinungsbild der Software kann einfach geändert werden durch eigenen Programm-Namen, Austausch der Farben / des Startbildes, Hinzufügen eines Logos oder sogar Erstellung eines neuen Fragenkatalogs.

- Das **Visioface® 1000 D** Programm zur Untersuchung von Gesichtsaufnahmen ist ebenfalls in die Software integriert.

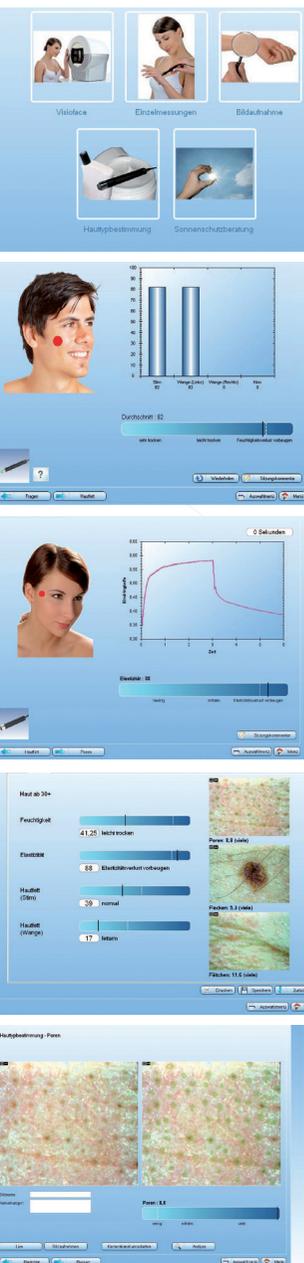

Gesichts-Fotografie zur Analyse und Dokumentation der Behandlung

VisioFace® 1000 D

- ❖ Ganzgesichtsfotografie, die Methode für eine umfangreiche und ökonomische Analyse des Gesichts
- ❖ Die Hardware besteht aus einer beleuchteten Gesichtskabine, in die das Gesicht frontal oder seitlich platziert wird.
- ❖ 210 wartungsfreie weiße Leuchtdioden in der Innenseite der Kabine sorgen für eine homogene Beleuchtung des Gesichts.





- ❖ Eingebaute, qualitativ hochwertige hochauflösende Kamera, erfordert kein kompliziertes Set-up seitens des Benutzers; einfaches Anschließen des Geräts mit USB und an die Stromversorgung für den sofortigen Gebrauch.
- ❖ Im Ruhezustand bleibt das VisioFace mit einigen Dioden ohne Hitzeentwicklung ansprechend beleuchtet.
- ❖ Analyse mit der Complete Skin Investigation Software CSI, ideal in Kombination mit dem Sondengerät Multi Skin Test Center.
- ❖ Die Software ist in der Lage, auf dem Farbbild sichtbare Flecken sowie Poren, Fältchen und Farbunterschiede im gewählten Bereich zu analysieren.
- ❖ Erstellung UV-ähnlicher Bilder
- ❖ Berechnung eines 3D-Bilds
- ❖ Bis zu vier Bilder eines jeden Kunden können nebeneinander gestellt und gleichzeitig oder einzeln gezoomt und analysiert werden.

Gesichts-Fotografie zur Analyse und Dokumentation der Behandlung



VisioFace® 1000 D

- Das Live Bild kann über ein bereits aufgenommenes Bild des Kunden gelegt werden, um die Gesichtsposition stets gleich zu halten.
- Mehrere Bilder können zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen werden für eine spätere gemeinsame Analyse und Vergleich.
- Produkte können in die Software eingegeben werden, z.B. Tages-, Nacht- oder Sonnenpflege; Empfehlungen entsprechend dem Alter und Geschlecht erfolgen automatisch.
- Aussagekräftiger Bericht, der Fotos, Ergebnisse und Produkte beinhaltet und ausgedruckt werden kann
- Software kann bezüglich Farbe, Logo, Bilder sowie Schrift gemäß dem Firmenauftritt angepasst werden.

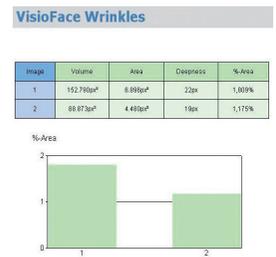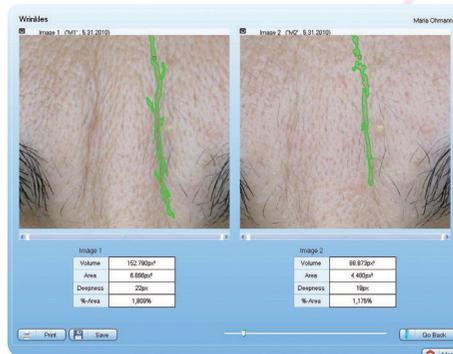

Falten


3D-Funktion

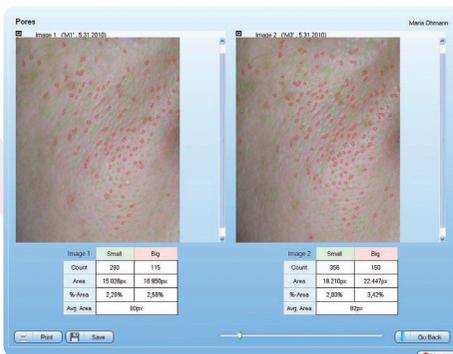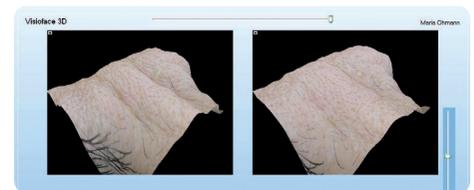

Poren



Farbe

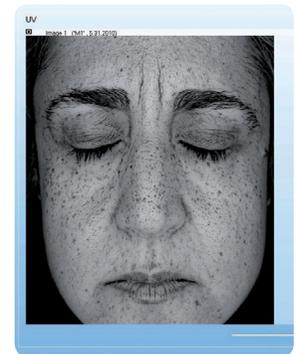

versteckte Flecken


Technische Daten:
 Maße: 54 x 50 x 44 cm; Gewicht: 14 kg;
 Externe Spannungsversorgung: 100-240 VAC/12VDC;
 Kamera: Canon EOS 1100 D, 12 Megapixel;
 Licht: 210 weiße LEDs;
 Schnittstelle: USB

Technische Änderungen vorbehalten.

Aufnahmen des Gesichts zur Dokumentation und Analyse

VisioFace® lite


- Kleines, formschönes Gerät zur Gesichtsfotografie und Bild-Analyse.
- Das einzigartige, lichtleitende Kunststoffmaterial sorgt für eine weiße homogene Ausleuchtung. Blauviolette Standby-Beleuchtung.
- Miniaturkamera (5 Megapixel) für detailreiche Aufnahmen des Gesichts.
- Kleine Maße und geringes Gewicht sind ideal für den mobilen Einsatz.
- Der Ständer, der das Gerät für den Tischeinsatz auf eine bequeme Höhe bringt, schützt das Gerät gleichzeitig beim Transport.
- Kinnstütze zur exakten Positionierung des Gesichts, frontal oder seitlich.
- Anschauliche Analysen von Parametern (Poren, Falten, Flecken, Sonnenschäden, Farbe, 3D Details) auf der Gesichtsaufnahme.
- Empfehlungen für Produkte und Behandlungen erscheinen automatisch.
- Das VisioFace® lite arbeitet mit dem Gesichtsaufnahme-Menü der Software Complete Skin Investigation (CSI).

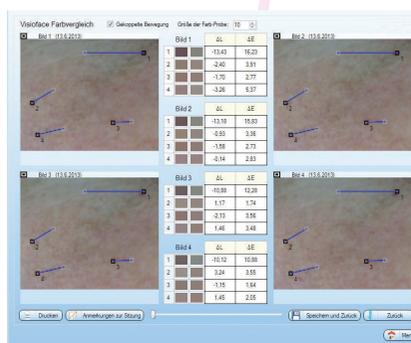

Farbe




Falten

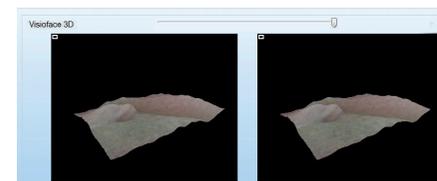


3D-Funktion



Poren

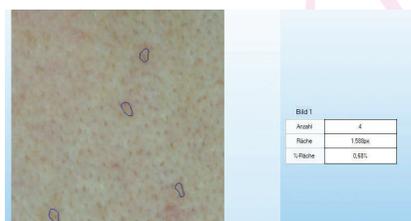

Flecken

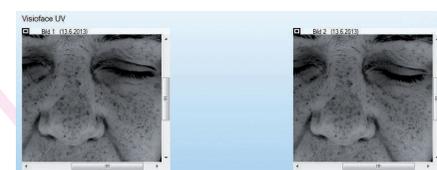

versteckte Flecken

Technische Daten

Maße: Höhe 29,2 x Breite 20,8 x Tiefe 23 cm, Gewicht: (ohne Ständer) 3,4 kg,
 Beleuchtung: Standby: blau-violett, aktiviert: weiß (Umschalten durch Näherungssensor),
 Kamera: 5 Megapixel, Auflösung 1944 x 2592 Pixel,
 Stromzufuhr Beleuchtung: externes Netzteil 100-250 V, 47-63 Hz, DC 12V/9A, Port: USB
 Computer: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10
 Technische Änderungen vorbehalten.



www.courage-khazaka.de

electronic Köln, Germany